



DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y REFERENCIAS

Descontaminación ocular



Estación Mural solución Diphotérine® LMDAS

Descripción:

Gabinete de pared - con Puerta (protección contra el polvo) que contiene:

- 2 x Botellas de 500 ml de solución Diphotérine®
- 1 x Botellas de 200 ml de solución Afterwash II®
- 1 X Aerosol MiniDAP de 200 ml de solución Diphotérine®

Cada botella de 500 ml de la estación de Mural solución Diphotérine® (con ojera ergonómica) permite la descontaminación de un ojo.

El Aerosol MiniDAP permite la descontaminación de un área equivalente a un brazo, pierna o torso.

Usar en el primer minuto desde el accidente

Producto de uso único

Utilizar todo el contenido

Caducidad: 2 años (Renovar antes la fecha de caducidad)



Lavaojos solución Diphotérine® LPMD

Descripción:

Lava ojo de 500 ml de solución Diphotérine® - con ojera ergonómica.

Este equipo permite la descontaminación de un ojo en el **primer minuto** desde el accidente químico.

Usar en el primer minuto desde el accidente

Producto de uso único

Utilizar todo el contenido

Caducidad: 2 años (Renovar antes la fecha de caducidad)



Lava Ojo Individual Estéril solución Diphotérine® LIS

Descripción:

Lava Ojo Individual Estéril de 50 ml de solución Diphotérine® - con ojera ergonómica.

Este equipo permite descontaminación de un ojo en los **10 primeros segundos** desde el accidente químico.

El Lava Ojo Individual Estéril debe ser portado por el operador para permitir una intervención inmediata después de la proyección química.

Usar en los primeros 10 segundos después del accidente

Producto de uso único

Utilizar todo el contenido

Caducidad: 2 años (Renovar antes la fecha de caducidad)





PREVOR
PREVENIR Y SALVAR



DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y REFERENCIAS

Descontaminación Cutánea

	<h4>Ducha Autónoma Portátil solución Diphotérine® DAPD</h4> <p>Descripción: Ducha con 5 litros de solución Diphotérine®.</p> <p>Este equipo permite la descontaminación completa de una persona en caso de proyección química en todo el cuerpo.</p> <p>El Aerosol micronizado descontamina la piel sin agresión.</p> <p>Usar en el primer minuto desde el accidente Producto de uso único Utilizar todo el contenido</p> <p>Caducidad: 2 años (Renovar antes la fecha de caducidad)</p>
	<h4>Aerosol solución Diphotérine® MINIDAP</h4> <p>Descripción: Aérosol de 200 ml de solución Diphotérine®.</p> <p>El Aerosol MiniDAP permite la descontaminación de un área equivalente a un brazo, pierna o torso.</p> <p>El Aerosol micronizado descontamina la piel sin agresión.</p> <p>Usar en el primer minuto desde el accidente Producto de uso único Utilizar todo el contenido</p> <p>Caducidad: 2 años (Renovar antes la fecha de caducidad)</p>
	<h4>Spray solución Diphotérine® MICRODAP</h4> <p>Descripción: Spray contiene 100 ml de solución Diphotérine®.</p> <p>Esta equipo permite descontaminar una superficie equivalente a una cara, una mano ó un pie.</p> <p>El Aerosol micronizado descontamina la piel sin agresión.</p> <p>Usar en el primer minuto desde el accidente Producto de uso único Utilizar todo el contenido</p> <p>Caducidad: 2 años (Renovar antes la fecha de caducidad)</p>



PREVOR
PREVENIR Y SALVAR
Laboratorio de Toxicología y el Manejo del Riesgo Químico

www.prevor.com
www.cicamed.com.mx



Representante exclusivo en México
CICAMED Z, S.A. de C.V., CDMX
Tel: (55) 6991.7744 / 5211.0491
Emergencia 24h/24h Nextel: (55) 2475.6977
e-mail: cicamed@att.net.mx